

Bruksanvisning Multitest UT-6C

1
2
3



Öppna locket på behållaren. Provet kan sedan lämnas direkt i behållaren! Fyll i ID-märkningen på behållarens sida (namn, datum och provansvarig).



Avlägsna skyddsremsan på baksidan av testet och placera behållaren på en plan yta. Aktivera testet genom att trycka på plastnyckeln (finns i locket) i hålet på nedre delen av behållarens sida.




Avläs temperatur samt testresultat efter 3 minuter. Godkänd temperatur indikeras med färgskiftning mellan 32 och 37°C. Om ingen färgskiftning syns bedöms provet som ogiltigt och bör tas om.

Exempel på testresultat för Multitest UT-6C

NEGATIVA:
Samtliga

POSITIVA: amfetamin och THC
NEGATIVA: kokain, ecstasy, morfin
och bensodiazepiner

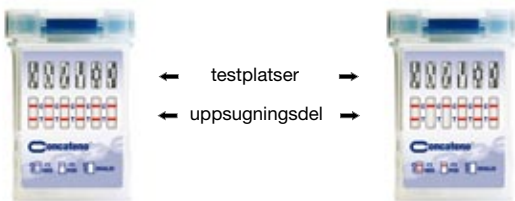

NEGATIVT RESULTAT

Där både kontrollstreck (C) och teststreck (T) framträder bedöms resultatet som negativt. OBS! Test-strecket (T) kan framträda svagare än kontrollstreck (C).

POSITIVT RESULTAT

Där kontrollstreck (C) framträder men teststreck (T) saknas bedöms resultatet som positivt. Vid positivt utfall rekommenderas en verifikationsanalys på ett ackrediterat laboratorium.

OGILTIGT RESULTAT

Om kontrollstreck (C) uteblir är testet ogiltigt och nytt test bör tas.

Bruksanvisning för Concatenos drogtester

Denna bruksanvisning visar hur du enkelt, snabbt och säkert använder Concateno Scandinavias olika drogtester. Samma hantering gäller för både singel- och multitester.

1
2
3



Samla urinen i en ren och torr bägare.



Öppna förpackningen och tag ut testet i direkt anslutning till provtagningen. Tag av skyddshylsan på multitestet.




Ställ ner testet i bägaren. OBS! Urinnivån får ej överstiga testets uppsugningsdel. Vid behov, håll över lite urin till en annan bägare. Resterande urin sparas för ev. verifikation.

Tag upp och läs av testet efter 3 minuter. OBS! Testresultatet ska ej avläsas senare än 10 minuter efter påbörjat test.

Exempel på testresultat för Multi 4 test

NEGATIVA:
Samtliga

POSITIVA: Amfetamin och THC
NEGATIVA: Bensodiazepiner och
opiater

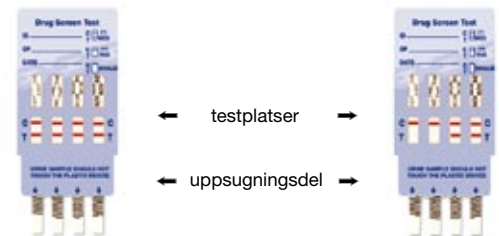

NEGATIVT RESULTAT

Så snart två streck kan anas är testet negativt. Observera att test-strecket (T) framträder svagare än kontrollstreck (C).

POSITIVT RESULTAT

Där endast ett rosa streck (kontrollstreck C) framträder är resultatet positivt. Vid positivt resultat rekommenderas att urinprovet skickas för verifikation.

OGILTIGT RESULTAT

Om kontrollstreck (C) uteblir är testet ogiltigt och nytt test bör tas.